



**Codice : DL-MC01**

**COV MASCHERINA CHIRURGICA 3 VELI CF. 50 PZ**

<b>Codice prodotto</b>	<b>DL-MC01</b>	<b>Descrizione: Mascherina chirurgica</b>
<b>Produttore</b>	<b>DI.ELLE GROUP SRL</b>	
<b>Sede Legale</b>	<b>Via Domenico Cirillo n.25 (Grumo Nevano)</b>	
<b>Sede Operativa</b>	<b>Garibaldi n. 347 (Grumo Nevano)</b>	
<b>NORME UNI</b>	<b>UNI EN 14683:2019 e UNI EN 10993-1:2010</b>	
<b>Indicazioni d'uso:</b>	La maschera chirurgica è indicata sia per operatori sanitari (o assimilabili), sia per lavoratori delle imprese e cittadini.	
<b>Descrizione:</b>	Le mascherine prodotte sono monouso, hanno dimensioni tali da coprire naso e bocca Sono costituite da tre strati in TNT di diversa grammatura, così disposte: <ul style="list-style-type: none"><li>• strato esterno: tessuto non tessuto in 100 % polipropilene 60 g/mq;</li><li>• strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto in 100 % polipropilene 20g/mq;</li><li>• strato intermedio: 100 % polipropilene 40 g/mq senza fibre di vetro;</li></ul> Le mascherine sono munite di elastico per consentire all'operatore di calzarle.	
<b>Dimensioni</b>	17 cm X 9,5 cm	
<b>Potere di filtrazione</b>	La maschera chirurgica DL-MC01 ha un potere di filtrazione >98% ed è classificata come Tipo I-II in conformità alla norma UNI EN 14683:2006. Non è citotossica e non causa irritazione alla pelle o reazioni allergiche come dimostrato dai test effettuati secondo la norma ISO 10993.	
<b>Lattice</b>	Né il dispositivo né il materiale utilizzato per il confezionamento contengono lattice di gomma naturale.	
<b>Sterilità</b>	La maschera chirurgica DL-MC01 non è un prodotto sterile	
<b>Confezionamento Etichettatura</b>	Le maschere chirurgiche sono confezionate singolarmente in buste di cellofan raccolte a loro volta in scatole di cartone. L'etichettatura è apposta su ciascuna delle confezioni cellofan di vendita ed identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il numero di lotto e la data di scadenza, la Ragione sociale del fabbricante, indicazione che il prodotto è monouso non sterile.	
<b>Controindicazioni e avvertenze</b>	Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica non può essere riutilizzata.	
<b>Conservazione</b>	Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.. Il periodo di validità è di 5 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.	
<b>Modalità di smaltimento</b>	Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.	



**Distributore: N**




Via Bagnulo 168, 80063 Piano di Sorrento (NA) ITALY



Codice : DL-MC01

COV MASCHERINA CHIRURGICA 3 VELI CF. 50 PZ

Corretto utilizzo mascherine

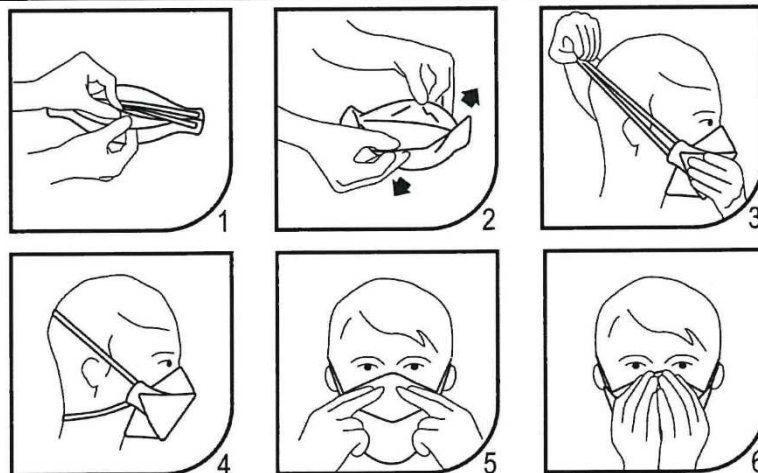

**Avvertenze**

Prima di indossare la mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone; Indossare la mascherina prendendola per gli elastici per evitare di contaminare la mascherina stessa; Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone; Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida, le mascherine sono monouso e non riutilizzabili; Nel togliere la mascherina, rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore), buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.

Autocertificazione ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.M. 17/03/2020 n. 18 :la mascherina DL-MC01 risulta come mascherina protettiva



Distributore: Marigo Italia SRL

Via Bagnulo 168, 80063 Piano di Sorrento (NA) ITALY