


Kit per la ricerca degli anticorpi IgG/IgM anti-SARS-CoV-2 (Test Immunocromatografico)

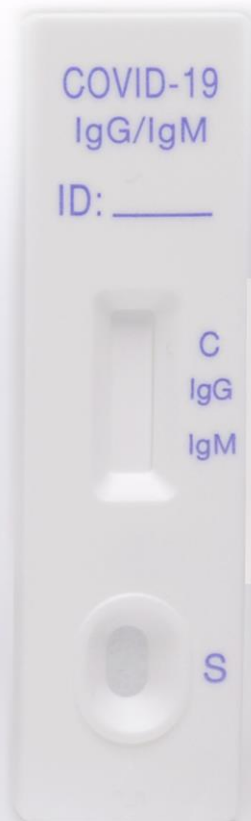

- **SEMPLICE**
- **RAPIDO**
- **ACCURATO**

“ Kit per la ricerca rapida, combinata degli anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 mediante tecnica immunocromatografia. Il test rileva in maniera qualitativa la presenza di anticorpi anti-COVID-19 nel sangue umano in 15-20 minuti. ”

Accurato e Affidabile

Test rapido anticorpale	COVID-19 IgM	COVID-19 IgG
Coincidenza positivi	82%	92%
Coincidenza negativi	94%	97%
Coincidenza totale	92.3%	96.30%

Nota: comparazione con il test molecolare

SEMPLICE

Sangue intero/Siero/Plasma


Entro 15 ~ 20 minuti



1 Aggiungere 1 goccia di siero o plasma (10µl) nel pozzetto campione (S).



2 Aggiungere 2 gocce (80-100µl) di sol. tampone nel pozzetto campione (S).

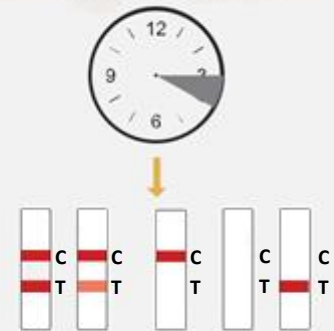

3 Leggere i risultati entro 15-20 min. Dopo 20 minuti il risultato è invalido.

Caratteristiche tecniche

	Test anticorpale IgG/IgM
Campione	Sangue intero/sierp/plasma
Velocità del test	15-20 minuti
Volume del campione	1 goccia o 10 µl
Confezionamento	20 test
Conservazione	T ambiente (4-30°C)

Lancette pungo dito e salviettine disinfettanti incluse