

WHISTLING
TEST

2019-nCoV Saliva Ag Whistling Test



Senza tampone naso-faringeo
Non più prelievo doloroso



Facile e semplice

95%


Accuratezza superiore al 95%



Test a singolo step




PROCEDIMENTO

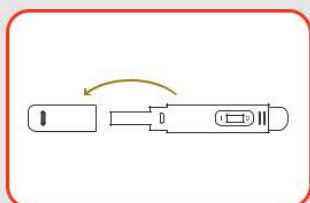

Aprire la busta di alluminio e
Tirare fuori il dispositivo.
Rimuovere il coperchio.



Inserire l'estremità assorbente del dispositivo nella bocca del paziente.
Tenendo il dispositivo in posizione orizzontale, raccogliere la saliva
dall'interno della bolla e dalla lingua.

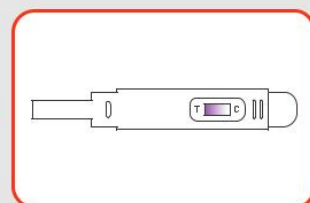

Estrarre il dispositivo quando si
vede una banda porpora
diffondere nella finestra centrale.


Verifica clinica

Le prestazioni del test sono state stabilite su 232 campioni prelevati da pazienti sintomatici, dopo 7 giorni dalla comparsa dei sintomi.

2019-nCoV Saliva Ag Whistling Test (Immunocromatografia)	Risultati test comparativo con RT-PCR		
	Positivo (+)	Negativo (-)	Totale
Positivo	108	1	109
Negativo	7	116	123
Totale	115	117	232
Sensibilità	93.91%, 95% CI (87.97,97.02)		
Specificità	99.15%, 95% CI (95.32, 99.85)		
Accuratezza	96.55%, 95% CI (93.34, 98.24)		

Risultati positivi ripartiti per giorni dalla comparsa dei sintomi:

Giorni dalla comparsa dei sintomi	RT-PCR Positivi (+)	2019-nCoV Saliva Ag Whistling Test (Immunocromatografia)	PPA
1	13	13	100%
2	32	32	100%
3	52	51	98.08%
4	69	67	97.10%
5	86	83	96.51%
6	102	97	96.00%
7	115	108	93.91%

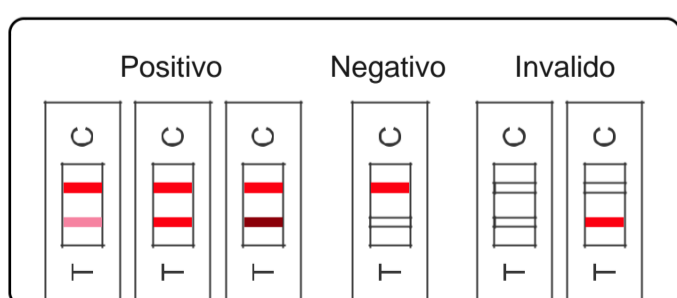
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI


Leggere il risultato dopo 10 minuti.
Prima di 10 min si possono avere risultati fasi negativi.
Oltre 10 min si possono avere risultati falsi positivi.